

Miele PS 1202B autoklaavi instrumenteille ja laboriotarvikkeille

- B-luokan (EN 13060) autoklaavi
- valmistettu lääkintälaitedirektiivin 93/42/EWG mukaisesti
- soveltuu kaikkien pakattujen ja pakkaamattomien umpinaisten, onttojen ja huokoisten tuotteiden sterilointiin
- nopea, Universal 134°C -ohjelma / 21 min.
- kapasiteetti 6 kg, myös onttoja instrumentteja




Mielen uusi PS 1202B autoklaavi

- B-luokan (EN 13060) autoklaavi
- valmistettu lääkintälaitedirektiivin 93/42/EWG mukaisesti
- soveltuu kaikkien pakattujen ja pakkaamattomien umpinaisten, onttojen ja huokoisten tuotteiden sterilointiin

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
Faksi (09) 875 97 299
asiakaspalvelu@miele.fi
www.miele-professional.fi

Mielen PS 1202B autoklaavin sterilointikammion tilavuus on 20 litraa ja sitä ympäröi kauttaaltaan kaksiseinäinen rakenne, joka toimii sähkölämmitteisenä höyrykehittimenä ja samanaikaisesti esilämmittää sterilointikammiota.

Tämä kaksiseinäinen paineastia integroidulla höyrystimellä on Mielen patentoimaa teknologiaa, joka mahdollistaa erittäin lyhyet ohjelma-ajat (esim. Universal 134°C / 21 min) ja turvallisen lopputuloksen.

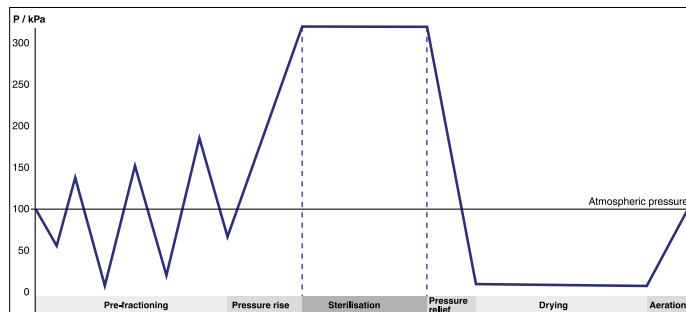

Mielen autoklaavissa on myös erittäin tehokas vakuumpumppu, jolla saavutetaan noin 20 mbar absoluuttinen paine. Korkea paine mahdollistaa tehokkaan vakuumin ja todella lyhyen kuivausajan.

Mielen 1202B autoklaavissa on kolme sterilointiohjelmaa ja kaksi lämpötilaa (121°C ja 134°C) sekä vakuumi-, Helix- ja B&D-testiohjelmat. Yleisimmin käytetty ohjelma voidaan käynnistää quickstart-näppäimestä. Jokainen ohjelma on täysin automaattinen. Näyttörudusta voi seurata ohjelman etenemistä ja tärkeitä ohjelmaparametrejä, kuten aika, paine ja lämpötila, tallennetaan 1 sekunnin välein.

Mielen PS 1202B voidaan liittää suoraan vesijohtoveteen, sillä sisäänrakennettu käänteisosmoosiyksikkö huolehtii automaattisesti laitteen tarvitseman määrän demineralisoidun veden tuottamisesta.



Laitteen toimitukseen kuuluvassa monikäyttöisessä yleistelineessä voidaan käyttää kerralla jopa 6 tarjotinta tai 3 konttia. Laitteen ovi avautuu täydet 180°. Ovenssa on lisäksi automaattinen paineilmalukitus, jonka ansiosta ovi pysyy tiivisti suljettuna koko ohjelma-ajan. Oven laaja aukeamiskulma helpottaa laitteen täyttöä ja tyhjennystä estäen samalla tahattoman kosketuksen luukun kuumaan pintaan.



PS 1202B on varustettu RS 232 liitännällä dokumentointia varten. Dokumentaatio voidaan lisävarusteiden avulla siirtää esimerkiksi suoraan verkkoon, USB-tikulle tai printteriin. Erikoisohjelmiston avulla saadaan printteristä tarroihin steriloitujen tuotteiden eränumerot, eräpäivät ja steriloinnin tehneen henkilön tiedot. Näin helpotetaan merkittävästi tuotteiden jäljitettävyyttä.

Tekniset tiedot

Pöydän päälle asennettava

K 533 / L 565 / S 580 mm

Kammion halkaisija 250 mm

Kammion syvyys 400 mm

Kammion tilavuus 20 l

Täyttömäärä enintään 6 kg instrumentteja tai 2 kg tekstiilejä

Ohjelma 134°C Universal / 21 min.

Veden ottoliitäntä (kylmä) x 1

Veden poistoliitäntä x 1

Sähköliitäntä 230-240V, 50-60 Hz, 1 x16 A

Paino 63 kg